



crownceram

LABORATOIRE DENTAIRE DEPUIS 1983

Flux numérique

CONNECTEZ VOTRE CAMÉRA INTRA-BUCCALE SIRONA

Le laboratoire Crown Ceram reçoit les empreintes prises par la caméra intra-buccale Sirona. **Vous désirez nous envoyer vos empreintes ?** Il suffit de se connecter à notre laboratoire en suivant ces instructions.



CONNECTEZ-VOUS À VOTRE COMPTE

- Afin de pouvoir envoyer vos empreintes numériques vers le laboratoire Crown Ceram, il vous faut rajouter le laboratoire à vos laboratoires favoris.
- Pour effectuer cette opération, vous devez commencer par prendre une empreinte numérique.
- Suivez les étapes jusqu'à pouvoir cliquer sur l'icône «**CONNECT**».



- Connectez vous avec votre compte. Le chargement de l'empreinte commence alors.

Veillez vous connecter

Nom de l'utilisateur 1

Mot de passe 2

Mémoriser le nom d'utilisateur et le mot passe

Mot de passe oublié ? Enregistrement

3

Login OK Annuler Quitter le portail

Portail Sirona Connect



- Une fois le téléchargement terminé, veuillez cliquer sur «**MODIFIEZ VOS LABORATOIRES FAVORIS**».



RECHERCHEZ LE LABORATOIRE CROWN CERAM

- Vous êtes redirigé(e) vers le portail SIRONA : <http://www.sirona-connect.fr/>.
- Sélectionnez «**RECHERCHER DES LABOS**».

PRÉSENTATION POUR CABINETS POUR LABORATOIRES SERVICES CONTACT

sirona
The Dental Company

SIRONA Connect MON SIRONA CONNECT > MONCOMPTE > MES LABORATOIRES FAVORIS

- Mon compte
 - Mon compte utilisateur
 - Mon profil d'entreprise
 - Mon adresse de facturation
 - Mon adresse de livraison
 - Mes laboratoires favoris**
 - Portails externes
 - Modifier le mot de passe
- Administration des utilisateurs
- Liste des commandes
- Déconnexion

Bienvenue sur SIRONA Connect

Mes laboratoires favoris

Utilisez la fonction de recherche ci-dessous pour créer la liste des laboratoires répondant à vos critères. Une fois la liste générée, vous pouvez ajouter un ou plusieurs laboratoires à votre listes de favoris.

| Nom du laboratoire | Code postal | Ville | Offres | Services | supprimer |
|--------------------|-------------|-------|-----------------|----------|-----------|
| | | | i i i i i i i i | i i i | |
| | | | | | ✖ |
| | | | | | ✖ |
| | | | | | ✖ |

RECHERCHER DES LABOS



- Saisissez dans le champs «**VOTRE ZIP**» la valeur «**68310**» puis cliquez sur «**LANCER LA RECHERCHE**».
- Une liste de laboratoires correspondante aux critères de recherche s'affiche.

Rechercher des labos

Votre zip 1

Cercle circonscrit

Services Expédition
 Livraison directe
 Mise en teinte

Offres Appareil Ortho
 Facettes
 Matériaux 3M ESPE
 Matériaux Ivoclar Vivadent
 Matériaux Sirona
 Matériaux VITA
 Restaurations antérieures esthétiques

LANCER LA RECHERCHE 2

SÉLECTIONNEZ LE LABORATOIRE CROWN CERAM

- Cliquez sur le «**SIGLE +**» à droite de la liste
- Si rien ne s'affiche, c'est que votre version de navigateur est trop ancienne. Veuillez la mettre à jour ou bien installer Firefox : <https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/>.

| Nom du laboratoire | Code postal | Ville | Distance ▲ | Offres | Services | ajouter |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|----------|---------|
| | | | | | | |
| Laboratoire Crown Ceram | 68310 | Wittelsheim | 3 km | | | |
| | | | | | | |

- Le laboratoire Crown Ceram se retrouve dans votre liste de laboratoires favoris.

Mes laboratoires favoris

Utilisez la fonction de recherche ci-dessous pour créer la liste des laboratoires répondant à vos critères. Une fois la liste générée, vous pouvez ajouter un ou plusieurs laboratoires à votre listes de favoris.

| Nom du laboratoire | Code postal | Ville | Offres | Services | supprimer |
|-------------------------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Laboratoire Crown Ceram | 68310 | Wittelsheim | | | |
| | | | | | |

FLUX NUMÉRIQUE

CONNECTEZ VOTRE CAMÉRA INTRA-BUCCALE SIRONA

ACTIVEZ LA MISE À JOUR

- Revenez dans le logiciel CEREC Connect et cliquez sur «**LISTE DES MISES À JOUR**».



- Vous pouvez maintenant sélectionner le laboratoire Crown Ceram pour envoyer votre empreintes numériques.