



**crownceram**

LABORATOIRE DENTAIRE DEPUIS 1983

# Kit de polissage FullZirCrown®

## ADAPTÉ AU MATÉRIAU UTILISÉ

Commandez votre kit spécialement développé pour une utilisation sur les restaurations monolithiques en oxyde de zirconium

### KIT FULLZIRCROWN®

Contient des outils de polissage spécialement formulés pour ajuster et polir intra-oralement les restaurations monolithiques en oxyde de zirconium.

### Contenu du kit :

- 3 fraises diamantées pour retouche/dépose pour turbine
- 2 polissoirs 1<sup>ère</sup> passe (bleu) pour contre angle
- 2 polissoirs 2<sup>ème</sup> passe (brun) pour contre angle



### Tous les éléments du kit peuvent être commandés séparément

	Référence	Vitesse préconisée	Type d'utilisation	Description	Prix TTC
	KITZIRCLUS91			Kit complet de polissage et retouche FullZirCrown®	123 €
	Z0801	200 000 tr/min	Petites retouches	Fraise diamantée - Taille 010 Vendue par lot de 5	68,70 €
	Z0850			Fraise diamantée - Taille 018 Vendue par lot de 5	68,70 €
	Z0833			Fraise diamantée - Taille 023 Vendue par lot de 5	68,70 €
	DCA04	Entre 100 000 & 150 000 tr/min	Lissage	Polissoir pour céramique - Taille 040 Vendu par lot de 2	31,90 €
	DCA13			Polissoir pour céramique - Taille 060 Vendu par lot de 2	31,90 €
	DCA10		Brillance	Polissoir pour céramique - Taille 040 Vendu par lot de 2	31,90 €
	DCA14			Polissoir pour céramique - Taille 060 Vendu par lot de 2	31,90 €

### REMARQUES ET CONSEILS

- Spécificité d'utilisation des fraises diamantées : toujours les utiliser sous irrigation liquide pour éviter les micro fissures.
- Ordre d'utilisation des fraises : après retouche, utilisez les polissoirs par étapes : 1<sup>ère</sup> passe (fraises bleues) puis 2<sup>ème</sup> passe (fraises brunes) pour avoir un résultat qualitatif.

LABORATOIRE CROWN CERAM

PARC D'ACTIVITÉS DU PAYS DE THANN  
760 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER  
68700 ASPACH-MICHELBACH  
☎ 03 89 57 67 22

WWW.CROWNCERAM.COM - INFO@CROWNCERAM.COM

