

Connexion avec Sirona

COMMENT ÇA MARCHE ?

Etape 1 : Rendez-vous sur www.sirona-connect.com et connectez-vous à votre compte.

Etape 2 : Dans la barre d'outils à gauche, cliquez sur **Mes destinataires favoris**.

2 **MON COMPTE**
Détails utilisateur
Modifier le mot de passe

MA SOCIÉTÉ
Informations sur la société
Adresse de facturation/d'expédition
Désactiver le compte

PARTENAIRE
Mes destinataires favoris
Portails associés

LISTE DES COMMANDES
Commandes envoyées

GESTION DES UTILISATEURS
Liste des utilisateurs

CONNECT CASE CENTER INBOX
Stations de travail existantes

Mes prestataires favoris

Utilisez la fonction de recherche ci-dessous pour créer une liste de destinataires qui corresponde à vos critères. Après la création de la liste, ajoutez un ou plusieurs destinataires à votre liste de favoris.

Prestataire	Code p...	Ville	
			🗑️
			🗑️
			🗑️
			🗑️
			🔍

Etape 3 : Vous pouvez ensuite chercher «CROWN CERAM» dans l'encadré rouge, saisir le code postal dans l'encadré bleu (voir ci-dessous) , sélectionnez le laboratoire puis validez.

3 Rechercher un prestataire

Chercher directement
 Chercher autour de moi

Nom du prestataire: **Crown Ceram**

Pays: **France**

Code postal: **68700**

Ville: Entrer la ville

Maintenance: Choisir votre option

Offre: Choisir votre option

Résultat de la recherche (1)

Lignes par page: 10 25 50 100 All

Prestataire	Code p...	Ville
Laboratoire Crown Ceram	68700	Aspach-Michelbach

Code postal **68700** :



Pour les planification implantaire



Pour la gamme Innovation France



Pour les aligneurs Cheez®



Code postal **75017** :



Gamme Access Import



Pour se connecter au laboratoire de proximité, l'Atelier, situé à Strasbourg, veuillez contacter le laboratoire Crown Ceram.

Une fois que le laboratoire a accepté la demande, vous pouvez nous envoyer vos prochains cas en choisissant le laboratoire Crown Ceram (dans la partie Connect de l'application).

